

弊社便をご利用頂き誠にありがとうございます。

当酸素ボンベ利用の際は、出発前に下記の取扱い方法を必ずお読み頂き、  
主治医・看護師の指導に基づき、確実に操作をして頂けますようお願い致します。

尚、空港係員・客室乗務員は、使用方法の説明・操作等は致しかねますのでご承知おき下さい。

## 酸素ボンベの使用方法

### 当日の貸出し方法について

1. 酸素ボンベは搭乗口\*でお渡しいたします。
2. 返却は、酸素ボンベを地上の旅客係員にお渡し願います。  
\*国際線では機内でお渡しいたします。使用後は客室乗務員へ返却願います。

### 酸素ボンベ付属品

- ・取り扱い説明書(本書)
- ・マスク 1個 / カニューラ 1個

### 使用方法

- ① カニューラ又はマスクを装着します。
- ② 流量設定器の目盛りが0である事を確認してください。
- ③ 流量設定器の目盛りを、医師より指示のある流量(診断書に記載の流量)に合わせてください。
- ④ 元栓をゆっくり「開」方向に回してください。  
国際線用では、元弁をゆっくり約1/4回転して開いてください。

※注意: 回転させて下さい。ピン等を外す必要は有りません。

参考: 流量設定は、0.25~6.0 リットル/分の範囲で調整  
できます。(国際線用は~5.0 リットル/分まで)

### 酸素ボンベ収納方法

前の座席の下に横倒しにして収納してください。



### 国内線仕様



※注意: バルブ操作時は「カチッ」と音がするまでゆっくり回してください

### 国際線仕様



※注意: バルブ操作時はゆっくり約 1/4 回転して開いてください