
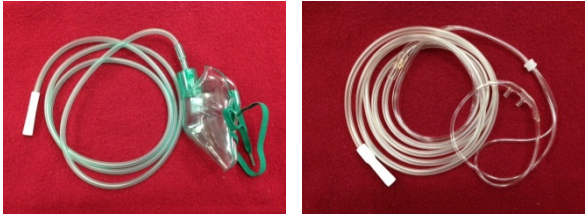

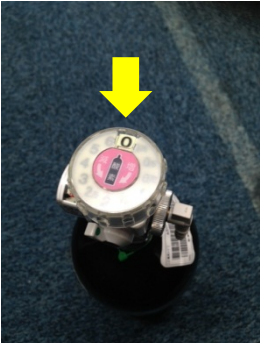






ご搭乗頂き誠にありがとうございます。

当酸素ボンベ利用の際は、出発前に下記の使用方法を必ずお読み頂き、  
主治医・看護師の指導に基づき、確実に操作をして頂きますようお願いいたします。  
空港係員・客室乗務員は、使用方法の説明・操作等は致しかねますのでご了承ください。



## 酸素ボンベの使用方法

	<b>各部名称</b> 	<b>付属品</b>  マスク                      カニューラ
<b>使用前</b>	① マスクまたはカニューラをマスク/カニューラ取付部に取り付けます。 	② 流量調整器の目盛りが“0”であることを確認します。 
	③ 元栓を「開」側に「カチッ」となるまで倒します。 	④ 流量調整器の目盛りを医師から指示された流量に合わせます。 
<b>使用后</b>	① 元栓を「閉」側に「カチッ」となるまで倒します。 	② 流量調整器の目盛りを“0”に合わせます。 

※酸素ボンベは前の座席の下に横にして収納してください。  
前に座席がない場合は、離発着時に膝の上で抱えてください。