

Gracias por embarcarse.

Para su información, el personal del aeropuerto y la tripulación de cabina no pueden operar un cilindro de oxígeno ni explicar su funcionamiento.

## Instrucciones para cilindros de oxígeno

### Funciones



Regulador de flujo

Salida de oxígeno

Válvula de cierre

### Adjuntos



Máscara



Cánula

### Cómo utilizar


① Conecte la mascarilla o la cánula a la salida de oxígeno.



② Asegúrese de que el dial del regulador de flujo esté en la posición "0".



③ Abra completamente la válvula de cierre (gírela hacia el indicador VERDE).

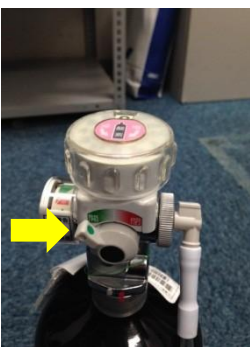

④ Gire el dial para ajustar el caudal de oxígeno según lo prescrito por su médico.



### Método de cierre

① Cierre completamente la válvula de cierre (gírela hacia el indicador ROJO).



② Establezca la escala del regulador de flujo en "0".



✘ Por favor guarde el cilindro debajo del asiento frente a usted.  
Si no cabe, por favor manténgalo en el regazo durante el despegue y el aterrizaje.